

COOL SHAPING™

Obtenga mejores resultados para el tratamiento y
Moldeamiento corporal
con tecnología cryolipólisis



Qué es Cryolipólisis ?


La cryolipólisis se refiere a tecnología novel no invasiva usando exposición al frío para manejar selectivamente la reducción de grasa subcutánea.

Cuando las células grasas son expuestas a un enfriamiento preciso, desencadenan un proceso de remoción natural que reduce gradualmente el grosor del panículo adiposo.

Las células grasas en el área tratada son gradualmente eliminadas a través del proceso metabólico normal para eliminar grasa indeseada.




¿Cómo funciona la Cryolipólisis?

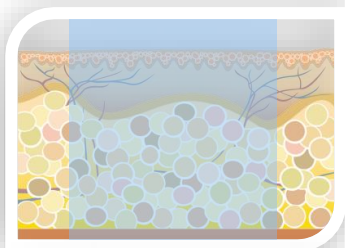


Paso 1.

Emitir energía fría al área grasa objetivo.

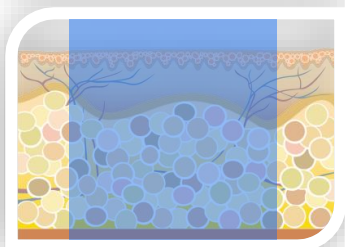


Paso 2.

Objetivo del área grasa con tasa de extracción de conservación de la energía fría.

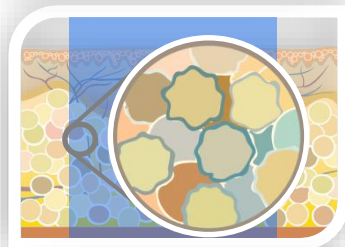

Paso 3.

Las células grasas alcanzan una muerte biológica lentamente.

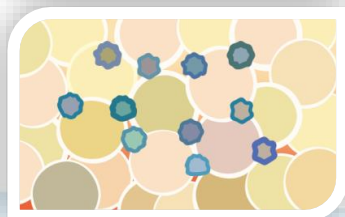

Paso 4.

Las células grasas en el área tratada son eliminadas a través del proceso metabólico natural del cuerpo.


Estructura del Coolshaping™

[Cuerpo]



Estructura de Coolshaping™

[Pieza de Mano]

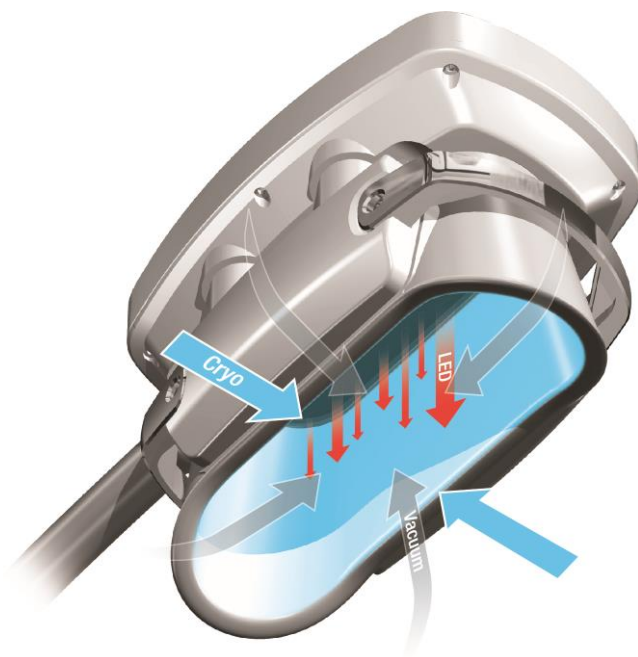

- **[Pieza de mano Mediana]**
108mm(W) x 188mm(D) x 138mm(H)
- **[Pieza de mano Grande] (Opcional)**
118mm(W) x 220mm(D) x 142mm(H)
- **[Pieza de mano Pequeña] (Opcional)**
63mm(W) x 160mm(D) x 136mm(H)

Obtenga mejores resultados para el tratamiento de adelgazamiento corporal por tecnología cryolipolysis

Tecnología Integrada™ por Cryo, Succión y LED

CRYO

VACÍO

LED

Coolshaping™ ofrece la tecnología más avanzada como solución para el tratamiento de adelgazamiento corporal con la Tecnología Integrada™.

El sistema suministra **cryo-energía** durante el tratamiento con **tecnologías de Vacío y LED** que mejora los efectos del tratamiento.

Coolshaping™ ofrece **cryo enfriamiento** para reducir las células grasas y descomponer la grasa.



Sistema Coolshaping™

Tecnología Integrada™ por Cryo, Vacío y LED

Sinérgicamente utiliza la Cryolipólisis, Vacío y LED para reducir las células grasas y descomponer la grasa.



Poderoso sistema de Cryolipólisis

- Dos poderosos enfriadores Peltiers unidos a la pieza de mano.
- Automaticamente controla la temperatura de enfriamiento.
- maximo -10 °C




Tecnología de vacío estable

- Nivel de aspirado controlable: paso1(bajo) al paso 10(alto)
- Varios pulsos de vacío : Pulso 1(continuo) al Pulso 4
Modo continuo, lento, medio, rápido



630nm LED Rojo

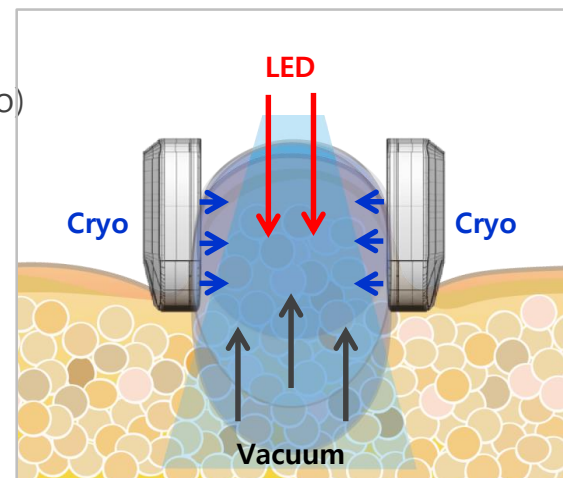


¿Cómo funciona Coolshaping™?

**PASO1. Inicio
Cryo-enfriamiento**

**PASO2. Inmediata
Cryo- reacción**

**PASO3. 30 días
Proceso Metabólico**

**PASO4. 90 días
Células eliminadas**

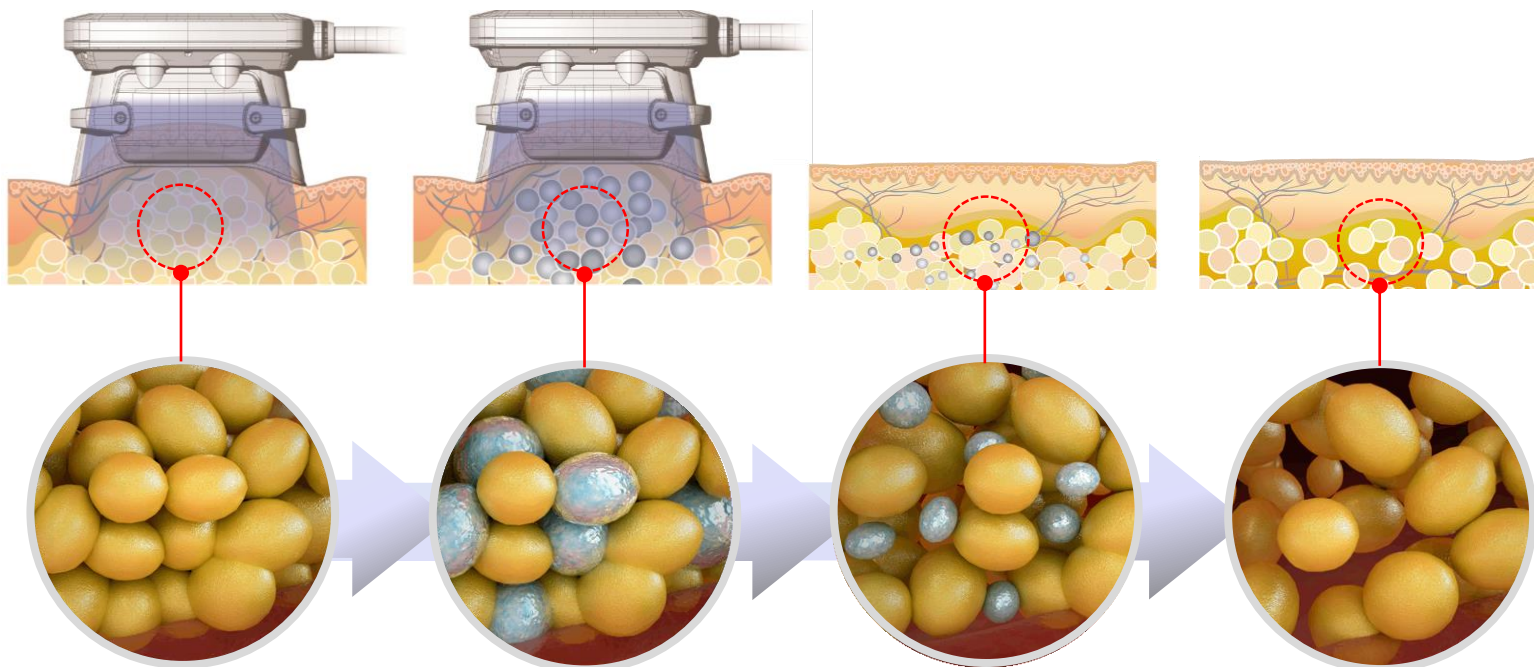

Aplicar Coolshaping en el área designada, Inicie cryo-enfriamiento para alcanzar la temperatura esperada.


Las células grasas en el área designada comienzan respondiendo a la cryo- cristalización.

Siguiendo el tratamiento, las células grasas alcanzan una muerte biológica y son removidas por procesos metabólicos.


Las células grasas son eliminadas

Ultrasonido de resultados por Coolshaping™

(F / 29, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)

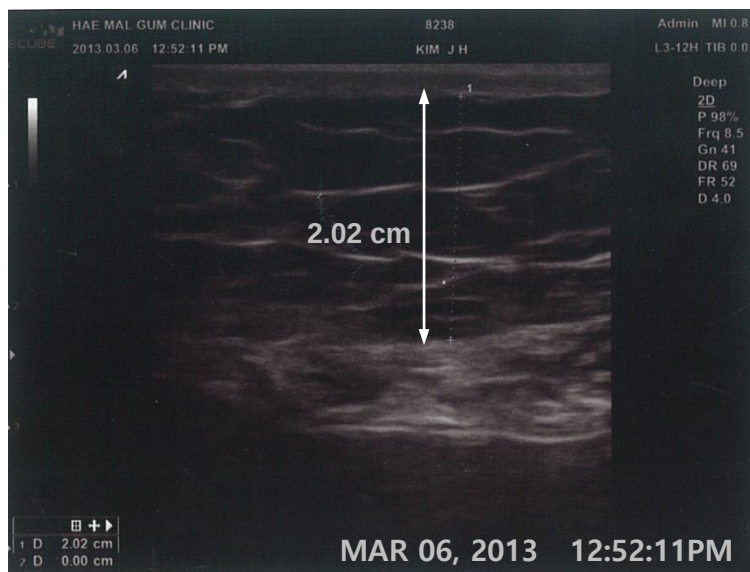

Antes del tratamiento

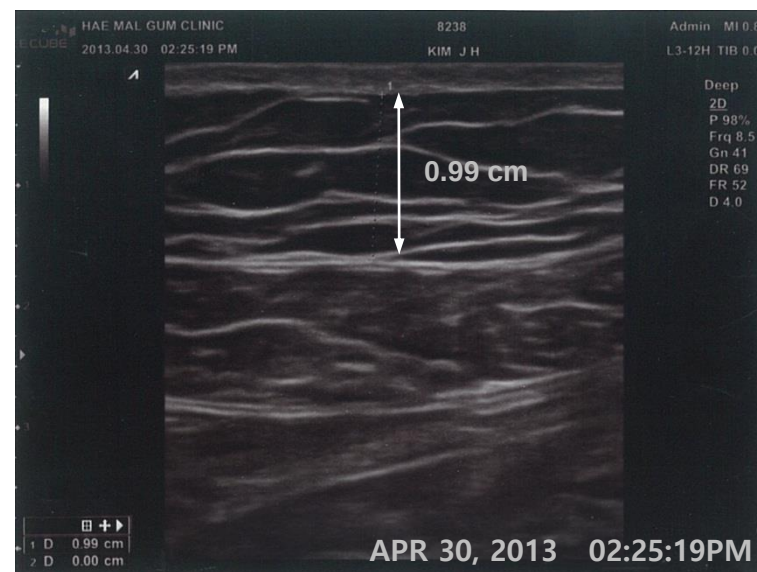

8 semanas después del tratamiento
(4semanas después del segundo tratamiento)


Note el cambio de 1.03cm en el grosor graso subcutáneo

Ultrasonido de resultados por Coolshaping™

(F / 33, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)



antes tratamiento

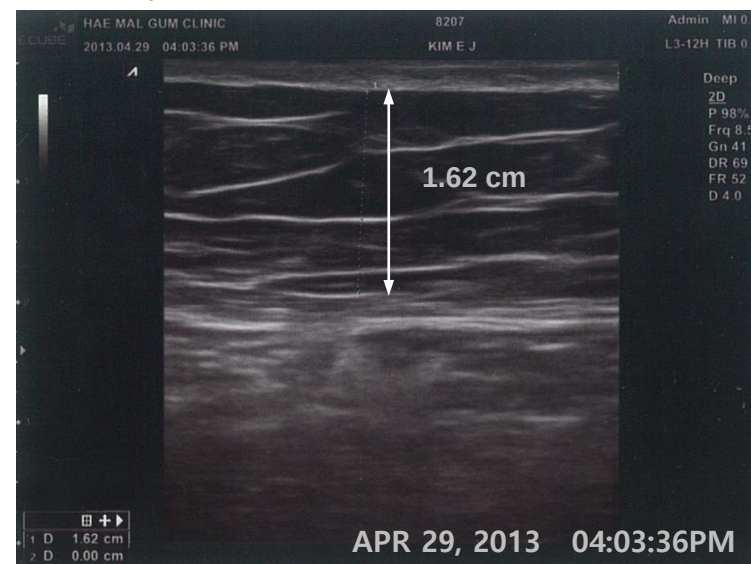


8 semanas después del tratamiento
(4semanas después del segundo tratamiento)


Note el cambio de 0.48cm change en el grosor graso subcutáneo

Ultrasonido de resultados por Coolshaping™

(F / 40, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)

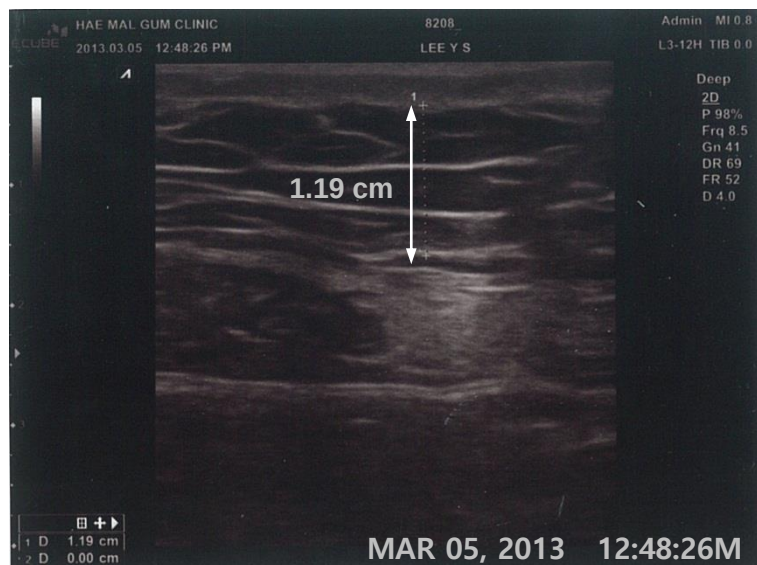

antes del tratamiento

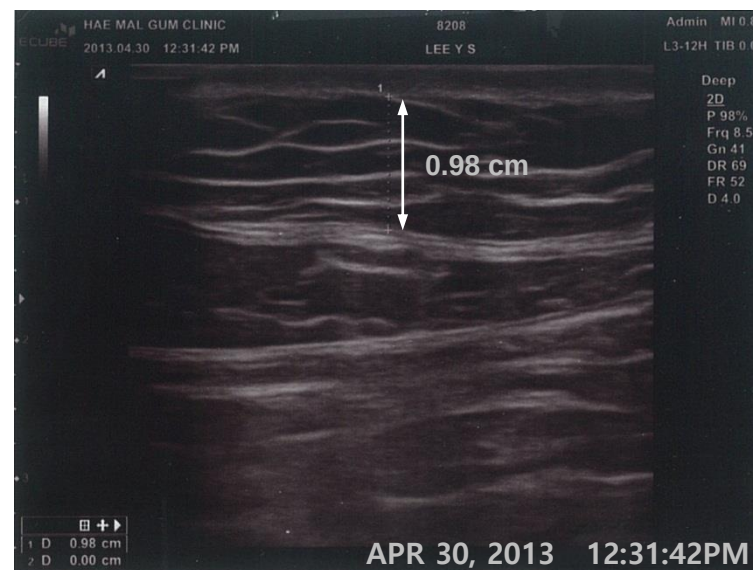


8 semanas después del tratamiento
(4semanas después del segundo tratamiento)

Note el cambio de 0.21cm en el grosor graso subcutáneo

Sistema Coolshaping™

- ❖ Entrega **energía-fría optimizada** para la reducción local de células grasas que permite redefinir los contornos del cuerpo.
- ❖ La exposición al enfriamiento está determinada de tal forma que ésta se enfoca en el nivel celular profundo del tejido subcutáneo **sin daño a otros tejidos** y protege la superficie de la piel.
- ❖ Mantiene **la temperatura estable del objetivo** durante el tratamiento. Adicionalmente el **Vacío y LED** mejoran efectivamente el resultado del tratamiento.
- ❖ células grasas en el área tratada se eliminan a través **proceso natural del metabolismo** del cuerpo. (Reduce las células grasas y resulta ser un método eficaz de alivio de celulitis)
- ❖ La reducción en la capa de grasa se muestra persistente, **resultados de hasta 6~8 meses** después del tratamiento. (* Esto depende de la condición del tratamiento y la condición del paciente.)

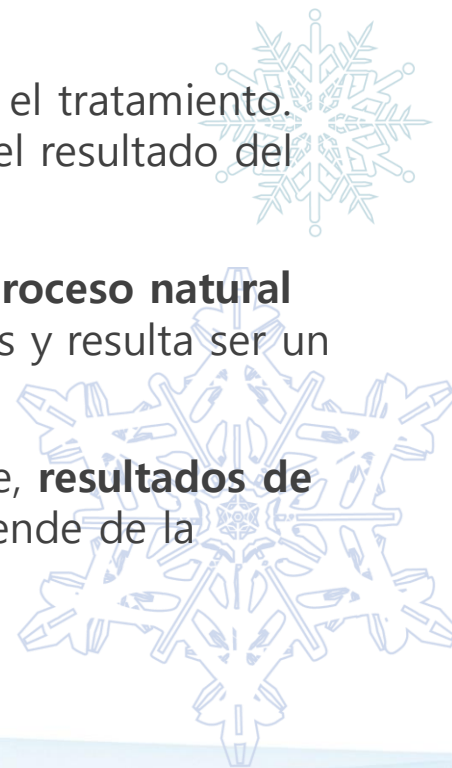

Ventajas Coolshaping™

- ❖ **Pueden operarse dos piezas de mano en simultáneo.**
- ❖ Dos piezas de mano pueden operarse separadamente o simultaneamente.
 - Esto permite el poder tratar 2 partes al mismo tiempo.
- ❖ **Función de proceso automático**
 - El modo automático puede configurarse en 3 pasos.
 - El pulso variable antes y después del tratamiento principal con 2 pasos hace mas comodo el tratamiento.
- ❖ **Pulso de Succión**
- ❖ 4 tipos de pulso de vacío: Pulso 1 al Pulso 4
- ❖ **Pieza de Mano Grande Opcional**
 - La pieza de mano grande puede ser provista opcionalmente.
 - Usted puede seleccionar una pieza de mano dependiendo del área de tratamiento.
- ❖ **Entrega energía-fría estable y un tratamiento cómodo**
 - Tecnología Silicon Peltier.



Interfaz de Usuario Conveniente

- Pantalla de Inicio**

Seleccione tipo de tratamiento



- Pantalla de control Principal**

- Seleccione el valor del tratamiento
- Al iniciar el sistema, todos los valores son automáticamente establecidos para fijar el valor establecido de la forma regular.



Almohadilla Fría / Cool Pad™

- Tamaño: 380mm x 300mm
- Ingredientes: Fluído anticongelante, agua

COOL PAD es un material necesario para el tratamiento Coolshaping (modelado en frío), mejora resultado del tratamiento y protege superficie de la piel de la temperatura de congelación.



Protocolo Coolshaping™



➤ Recomendación de Tratamiento

- Use en programa "PASO 1" al "PASO 3"

	temperatura	minutos	Pulso	Nivel
Paso 1. Calentamiento	-5°C	5min	Pulso 3 (Modo Medio)	3~4
Paso 2. Tratamiento	-5 °C	35~50 min	Pulso 1 (Modo Continuo)	3~4
Paso3. Perfeccionar	-5 °C	5min	Pulso 4 (Modo Rápido)	3~4

* Este depende de la condición del tratamiento o la condición del paciente.

➤ Período de Tratamiento

recomendado 3 tratamientos con un período de intervalo de 4 semanas



Tratamientos Coolshaping™

*Puede operar
2 piezas principales
al tiempo*

Puede operar 2 piezas de mano principales en Simultáneo.

- Abdomen
- Costados
- Muslos
- Espalda
- Caderas

Aplique tratamiento de **una pieza de mano sencilla**



Abdomen



Muslos

Aplique **dos piezas de mano** en simultáneo



Abdomen



Costados & Muslos


Especificaciones

Aplicadores	● 2 piezas de mano de tamaño medio 108mm(W) x 188mm(D) x 138mm(H) * Pieza de mano grande y pequeña opcionales
Tipo de Pulso	● Pulso 1 al Pulso 4
Temperatura de Enfriamiento	● -10°C ~ 5°C
Tiempo de Tratamiento	● 01:00 ~ 90:00 min
Nivel de Vacío	● Nivel 1 al Nivel 10
Potencia de Entrada	● 100~110V, 220~240V, 50/60Hz (max 600W)
Panel	● 10.2 pulgadas LCD & Pantalla táctil
Dimensiones (WxDxH mm)	● 1,066×379×438
Peso	● 60Kg


Fotos Clínicas

Abdomen

(F / 33, Pieza de mano grande, 2 veces con 4 semanas)

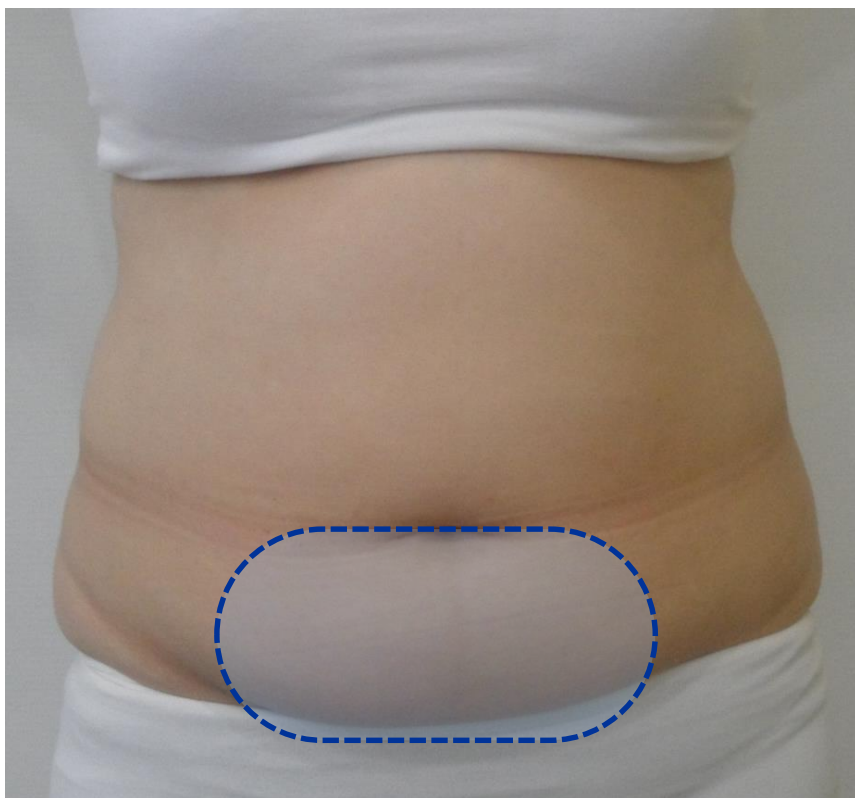

antes del tratamiento

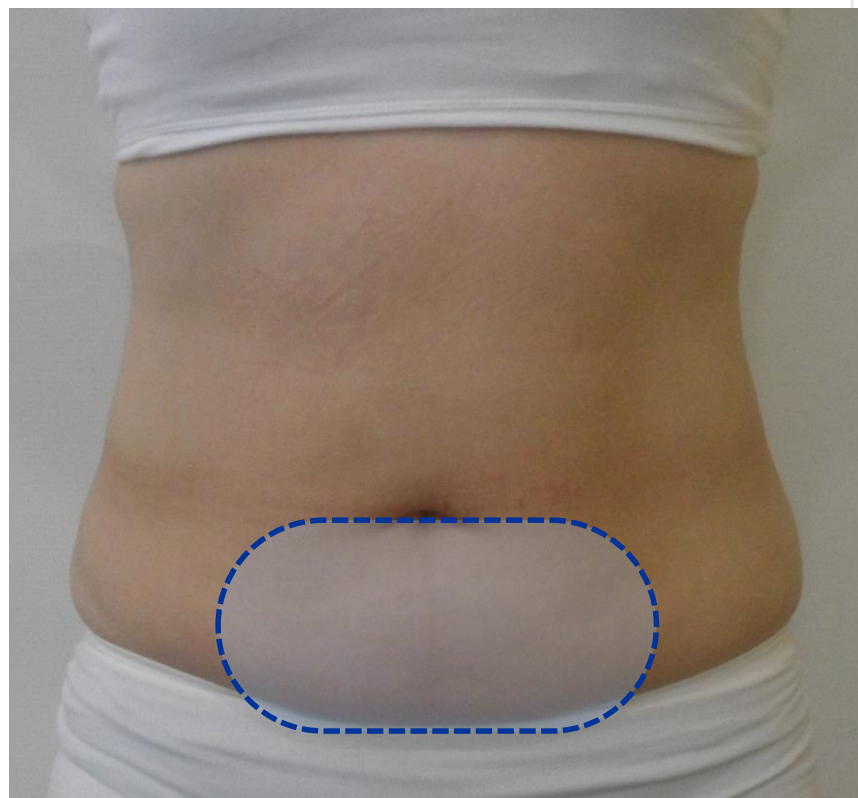

8 semanas después
(4 semanas después del segundo tratamiento)

Fotos Clínicas

Abdomen

(F / 26, Piezas de mano grandes, 3 veces con 4 semanas)



antes del tratamiento




10 semanas después
(2 semanas después del tercer tratamiento)


Fotos Clínicas

Espalda/ Costados

(F / 32, Piezas de Mano medianas, 2 veces con 4 semanas)

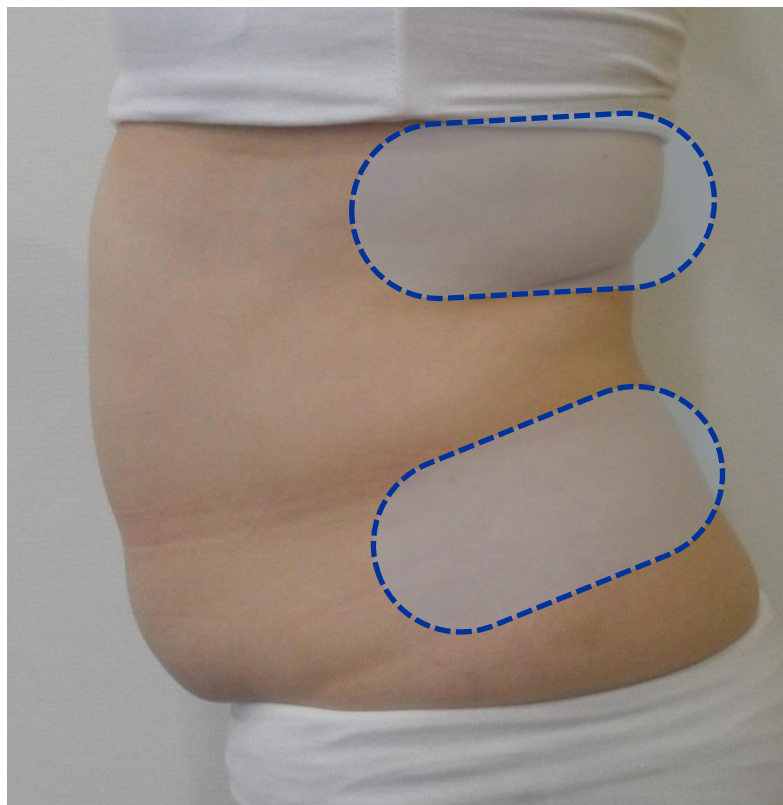

antes del tratamiento

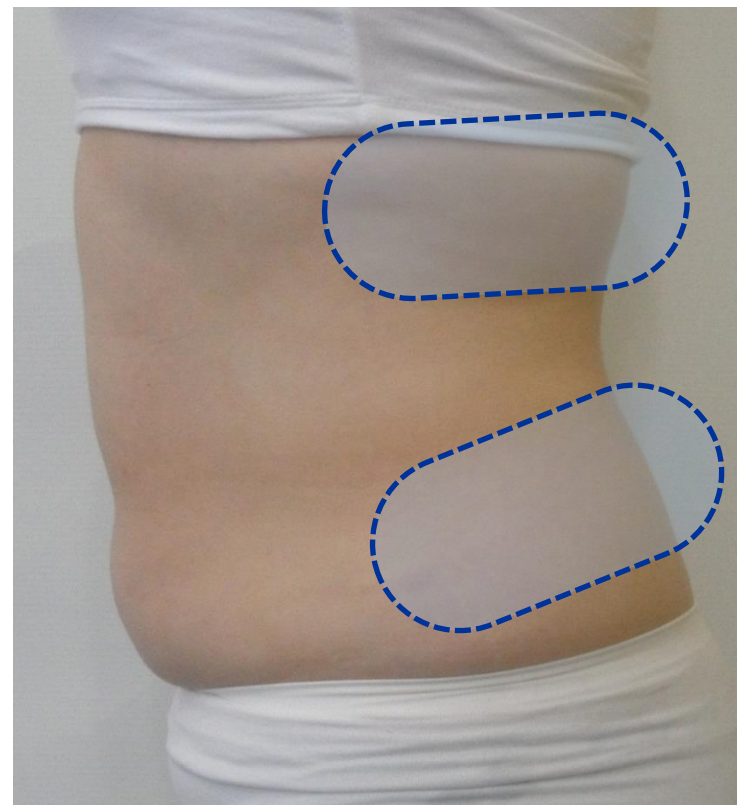


8 Semanas después
(4 semanas después del segundo tratamiento)


Fotos Clínicas

Abdomen / Costados

(F / 24, Piezas de Mano grandes, 3 veces con 4 semanas)

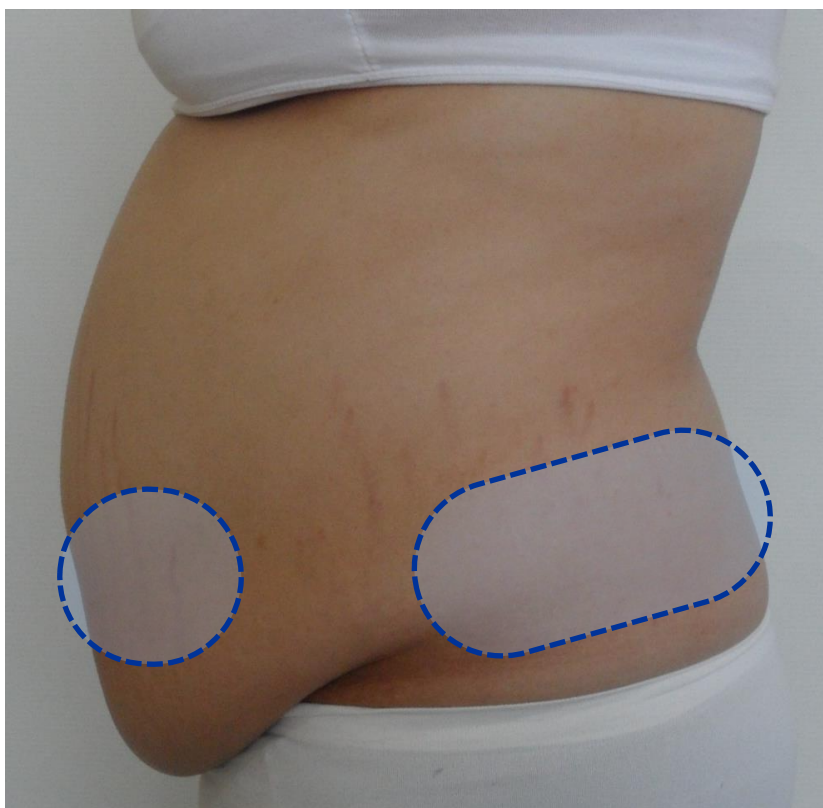

Antes del tratamiento

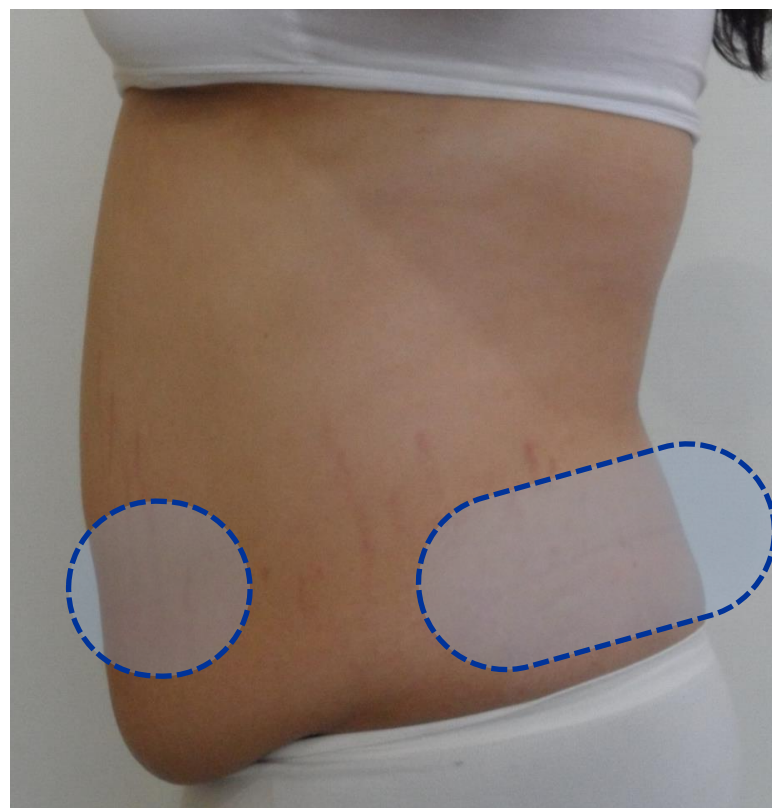


12 semanas después
(4 semanas después del tercer tratamiento)


Fotos Clínicas

Espalda

(F / 40, Piezas de Mano medias, 2 veces con 4 semanas)

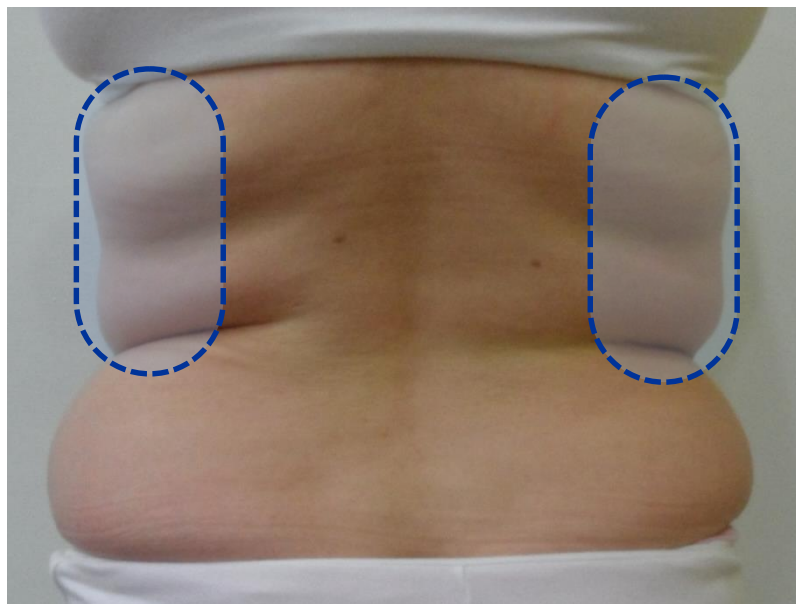

Antes del tratamiento

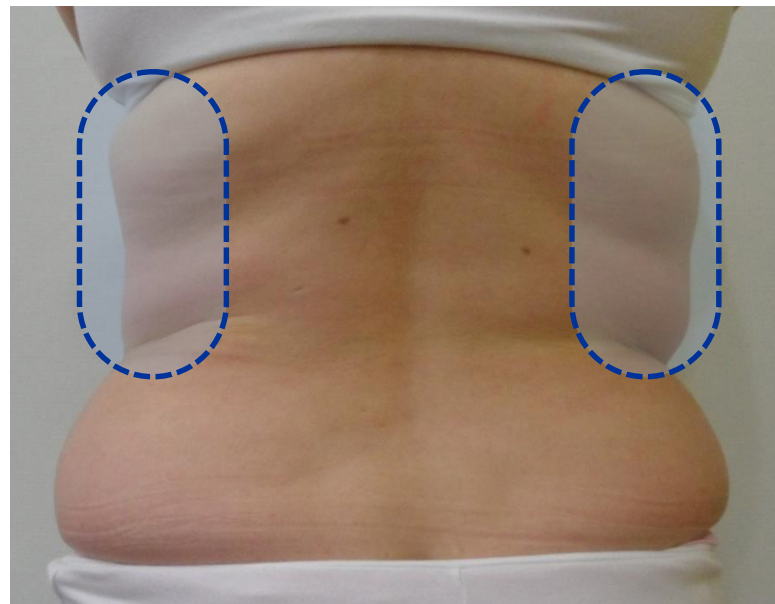


8 semanas después
(4 semanas después del segundo tratamiento)


Fotos Clínicas

Muslos

(F / 32, 2 Piezas de Mano medias, 2 veces con 4 semanas)

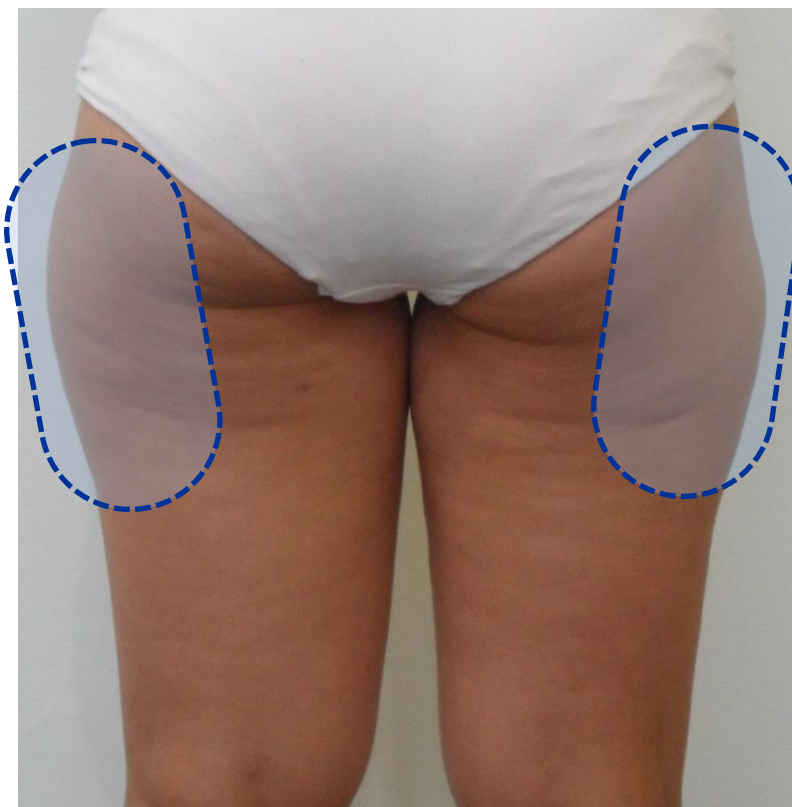

Antes del tratamiento

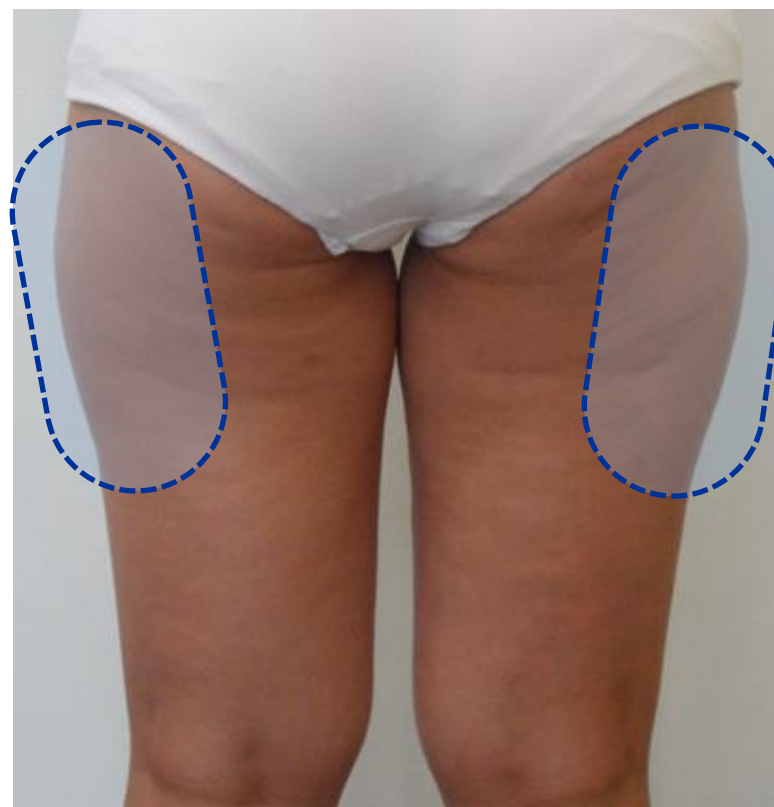

8 semanas después
(4 semanas después del segundo tratamiento)



Gracias



1102-1105, Hanra Sigma Valley, 345-90,
Gasam-Dong, Geumsheon-Gu, Seoul, Korea
Tel. +82-2-514-9713(Rep.)
Fax. +82-2-514-9716
E-mail: es@esglobal.co.kr
Website: www.esglobal.co.kr